

BA No.: 02.10.097/2016-12



## Brukermanual

# Tilbehør til Augsburg

## Dusj og toalettstol til barn

Article No.: 444.00.97

Sete bredde/dybde justering(A)


Inkluderer sikkerhetsbelte (B)

Serial Number

Article No.: 444.03.39

Hodestøtte (C)

Serial Number

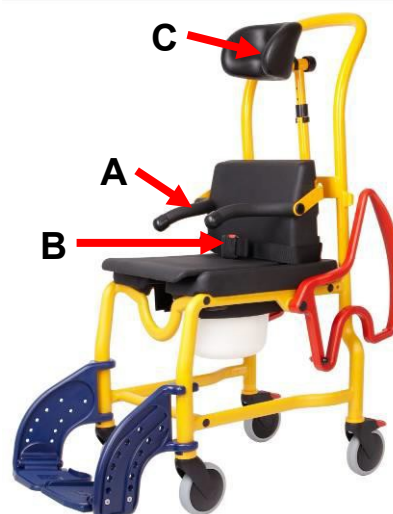


### Tekniske spesifikasjoner

#### Justeringsområder (armene og rygg)

Armlenene og ryggen kan justeres ved å løsne skruene. Bruk medfølgende rørnøkkel og umbrako.

Sete dybde: min. 250 mm, max. 295 mm  
Sete bredde: min. 225 mm, max. 325 mm

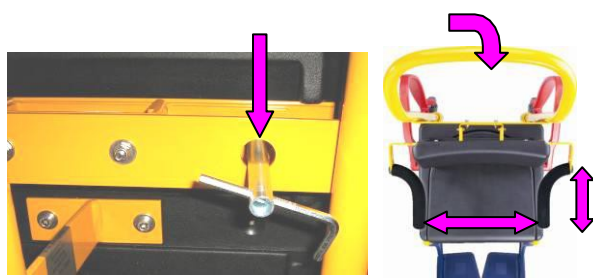



### Sikkerhetsbelte

#### Tiltenkt bruk

Sikkerhetsbelte er tiltenkt bruk for å sikre barnet for å unngå å falle ut av stolen når man bøyer seg frem.

#### Montering

- Drei stolens armlener tilbake.
- Trekk ryggstøtten helt opp.
- Legg belteløkkene rundt rørene.
- Skyv deretter ryggstøtten tilbake til du treffer streken.
- OBS! Pass på så beltet ikke kommer i klem.
- Drei armlenene fremover til de klikker på plass.

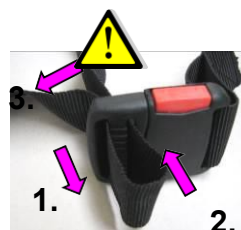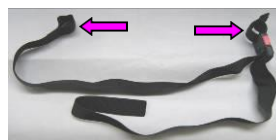

**Justere beltet**, trekk den løse enden ut av beltet og fest det igjen.

For å åpne beltet, trykk den røde knappen helt ned og trekk plastspennen ut.

**Hodestøtte****Tiltenkt bruk**

Med hodestøtten kan man justere støtten av hode etter barnets størrelse. Den gir dermed støtte til hode og nakke.

**Vekt.: 1.7 kg**

**Komponenter**



Antall	Beskrivelse	Art. No.
1	Hodestøtte komplett. Dybde: Justerbar 3 trinn. Høyde Justerbar 7 trinn	444.03.39
2	Skruer M6x30 A2	850.56.30
2	Mutter DIN 9021-6.4 A2	856.50.06

**Montering**

- Plasser den i hullene bak på stolen.
- Løsne begge M6 skruene som sitter i ryggstøtten med nøkkelen.
- Skru på hodestøtten(A) til tverrstykket (C) med begge M6 skruene. Alternativt kann det monteres på bakpute (D)

**Tilpasse**

Hodestøtten er justerbar i front (E) og høyde (F) med klips(G). Trekk klipsen ut, velg hull og sett inn klipp.

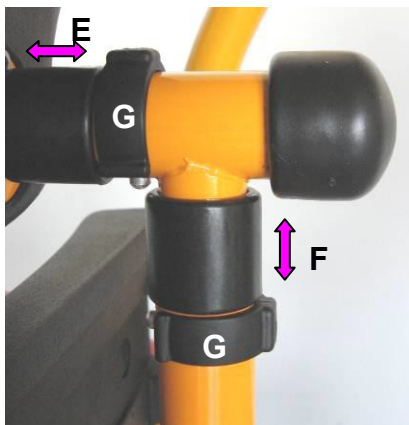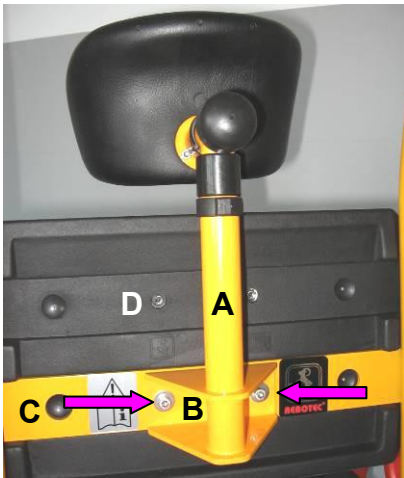**Sete bredde og dybde justering****Tiltenkt bruk**

Ved bruk setebredde og dybdejustering kan setedybden og bredden justeres for å passe barnets størrelse. Det sikrer maksimal sittekomfor.

**Vekt: 2.2 kg**

**Components**

Antal	Beskrivelse	Art. No .
A	Holder for pute	444.52.40
B	Bue for ryggpute	444.52.30
C1	Armlene- venstre	444.52.60
C2	Armlene-høyre	444.52.65
D	Rail til armlenene	444.52.50
E	Bak pute	440.10.02
6	Flat skruer M6x20 A2	853.06.20
8	Skiver DIN 9021-6.4	856.50.06
2	Sylinder skruer M6x20 A2	850.56.30
2	Sylinder skruer M6x30 A2	850.56.30
6	Mutter M6 A4	854.52.06
1	Pipe nøkkel 10mm	859.00.10
1	Nøkkel 5mm	858.00.05

**Assembly**

- Plasser den i monteringsanordningen bak på skolen.
- Løsne begge skruene M6 med nøkkelen som er festet til korsstykket på ryggstøtten.
- Skru (A+B) sammen med (D) og (C1)(C2) til ryggputen. Bruk M6x20 sylindrer skruer med mutter.
- Monter deretter (A) på ryggstøttens tverrstykke (F). For å gjøre dette bruk de flate skivene, M6x30 sylinderskruene og M6 nøkkelen. Skru godt til

